

 Nestlé Health Science

# Compat ella<sup>®</sup>

*Een goed begin is het halve werk*



*Kent u Compat Ella<sup>®</sup> al?*

De gebruiksaanwijzing is bijgesloten bij de originele pompset en kan worden gedownload via [www.compatella.com](http://www.compatella.com). Kijk ook eens op het interactieve trainingscentrum voor opleiding en scholing.


Interactive Training Centre: [www.trainingcentre.compatella.com](http://www.trainingcentre.compatella.com)

## Compat ella®

Training Centre

### • Invoeren van de toedieningsset

- 1 Druk de pompdeur omhoog.
2. Plaats de lus van de cassette om de rotor.  
*Let op de richting van de pijl.*
3. Plaats met behulp van uw duim de cassette en trek de set naar rechts om deze vast te zetten.
4. Sluit de pompdeur door op het groene PUSH-symbool te drukken.

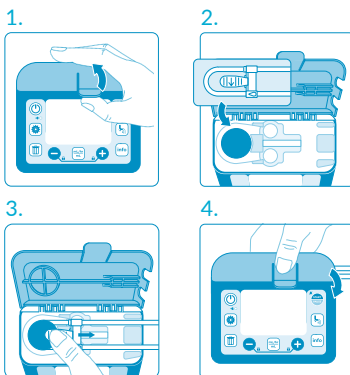

 **Waarschuwing:** Gebruik alleen Compat Ella® toedieningssets.

### • Overzicht kleurenscherm



Programmeren informatie:  
**zwarte** letters



Pomp werkt onder normale omstandigheden:  
**groene** pictogrammen en **zwarte** letters



Alarmen:  
**rode** letters en pictogrammen



Informatie:  
**blauwe** letters



Instellingen:  
**groene** letters

Kent u Compat Ella® al?

## • Toetsfuncties

Toets	Functie
	Druk deze toets gedurende 2 seconden in om de pomp in of uit te schakelen.
	Pomp starten/pauzeren of het alarm in sluimerstand zetten.
	Druk de toets gedurende 2 seconden in om de toedieningsset automatisch te vullen.
	Druk de toets meermalen in om de programmeerwaarden voor de inloopsnelheid, het volume en de interval te doorlopen.
	Waarden verhogen en verlagen (snelheid loopt op als knop ingedrukt wordt gehouden). Druk de beide toetsen gelijktijdig in om het toetsenbord te vergrendelen en te ontgrendelen.
	Door op deze toets te drukken worden de schermwaardes teruggezet naar de standaardinstelling of naar 0. Houd deze toets gedurende 3 seconden ingedrukt om de recente voedingstherapie te wissen.
	Doorloop de recente voedingshistorie. Druk de toets 2 seconden in en krijg toegang tot 30 daagse voedingshistorie.
	Doorloop de pompinstellingen.

Zij maakt het geven van sondevoeding eenvoudig

## • Voeden in de continu stand

Stap	Toets	Functie
1	 2"	Schakel de pomp in.
2		Bekijk het <i>ACTUEEL GELEVERDE VOLUME</i>
3		Wis het <i>ACTUEEL GELEVERDE VOLUME</i> bij het starten van een nieuwe voedingstherapie.
4	 2"	Vul de toedieningsset.
5		Stel de inloopsnelheid in 1-600 mL/Hr.
6		Stel het volume in 1-4000 mL/CONT*.
7		Start met voeden.

\*Continu voeden: zonder volumelimiet. De pomp blijft ononderbroken lopen tot de voedingshouder leeg is.






### Voorzorgsmaatregelen:

- Zorg ervoor dat u bij het programmeren van een nieuwe voedingstherapie de parameter *ACTUEEL GELEVERDE VOLUME* wist.
- Controleer bij het starten van een voedingstherapie alle parameters (inclusief de snelheid, dosis en actueel geleverd volume).

## • Voeden in de intervalstand

Voer de bovenstaande stappen 1 t/m 5 uit:

Stap	Toets	Functie
6		Stel het bolusvolume in 1 tot 2000 mL /uur
7		Stel de interval in, 00:15 tot 12:00 uur in stappen van 15 minuten.
8		Stel het totaalvolume in 1 - 4000 mL.
9		Start met voeden.

## ● *Compat Ella® reinigen*

Ze moet regelmatig worden schoongemaakt:

1. Koppel de pomp los van de netspanning en schakel de batterij uit voordat u gaat reinigen om het risico van een elektrische schok te vermijden.
2. Reinig de pomp met een vochtige spons of doek en water met een zeepoplossing.
3. De pomp is bestand tegen water en kan schoongemaakt worden onder stromend water.
4. Droog de pomp zorgvuldig af met een zachte doek voordat u haar weer gebruikt.



### Waarschuwingen!

- Reinig de pomp nooit terwijl deze ingeschakeld of aangesloten is op het lichtnet om elektrische schokken te voorkomen.
- Reinig de pomp niet in een vaatwasser of autoclaaf.
- Dompel de pomp niet onder in water.
- De pompbehuizing kan beschadigd raken door het gebruik van agressieve ontsmettings-/schoonmaakmiddelen en isopropylalcohol.

## ● *Garantie en onderhoud*

5 jaar service-interval








Service en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door personen die zijn geautoriseerd door de fabrikant.

## ● *Omgaan met alarmmeldingen*

Zorg ervoor dat de patiënt op de juiste manier en op gezette tijden wordt gecontroleerd, vooral wanneer een onderbreking in de sondevoeding de patiënt in gevaar kan brengen.

Stap	Toets	Functie
1		Druk op de  toets om het alarm te bevestigen.
2		Los elk alarm op door de onderstaande aanwijzingen te volgen.
3		Druk op  om het voeden te hervatten.

## Alarmberichten en oplossingen

Bericht	Oplossing
	Controleer of de toedieningsset volledig gevuld is. Als aanvullend vullen vereist is, kan het automatisch vullen herhaald worden.
	Het geprogrammeerde totale volume is volledig afgegeven. Opmerking: Als dit niet voorafgaand aan elke nieuwe voedingstherapie wordt gewist, gaat het alarm te vroeg af.
	Hervat de toediening of schakel de pomp uit. Verleng de pauzestand met nog eens 2 minuten door op  te drukken.
	Sluit de pompdeur.
	Open de deur en controleer of de toedieningsset correct geplaatst is.
	Indien de sondevoedingshouder leeg is, vervang deze en hervat het voeden. Controleer of er tussen de sondevoeding en de pomp lucht in de lijn aanwezig is en verzeker uzelf dat de toedieningsset volledig gevuld is en op de juiste wijze op de sondevoedingsverpakking is aangesloten.
	<b>GEEN TOEVOER:</b> Kijk of er sprake is van een knik of blokkering in de toedieningsset tussen de sondevoedingshouder en de pomp. <b>GEEN AFVOER:</b> Kijk of er sprake is van een knik of blokkering in de toedieningsset tussen de pomp en de voedingssonde. Indien nodig, spoel de voedingssonde. Verander, indien nodig, de positie van de toedieningsset of de pomp om ervoor te zorgen dat de voeding onbelemmerd kan stromen. Open de deur, controleer de plaats van de toedieningsset en sluit de deur weer. Hervat het voeden.
	Sluit de pomp m.b.v. de adapter aan op het lichtnet. Laad de batterij op.
	Verwijder het magnetisch veld of breng de pomp naar een andere plaats.
	Schakel de pomp uit en start opnieuw op om de fout te wissen. Gebruik de pomp niet indien de fout terugkeert of zich herhaalt. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger Nestlé Health Science.